

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 内視鏡用送気送水装置 JMDNコード：36500032

## 「内視鏡用炭酸ガス送気装置 GW-100」の付属品 送ガスチューブ CT-11G

### 【形状・構造及び原理等】

本製品は、取扱説明書「主な仕様」章に、消耗品として送ガスチューブ CT-11G が記載されている当社炭酸ガス送気装置と組み合わせて使用すること。

適用炭酸ガス送気装置：GW-100

オートクレーブ 可

本製品は、未滅菌である。  
(用時滅菌品)

### 【操作方法又は使用方法等】

#### ＜使用方法に関する使用上の注意＞

##### 使用方法

- ・本製品の使用方法は、使用する炭酸ガス送気装置の取扱説明書を参照すること。

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

##### 洗浄・消毒・滅菌

- ・クロイツフェルト・ヤコブ病患者または変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、専用の機器として使用するか、使用後に適切な方法で廃棄すること。使用する炭酸ガス送気装置の取扱説明書に記載する洗浄・消毒・滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の原因物質を取り除くことができないため、感染源となるおそれがある。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応方法は、種々のガイドラインを参照すること。

##### 廃棄

- ・廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄すること。
- ・感染性廃棄物に該当するかは、使用の状態によって判断すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### ＜貯蔵・保管方法＞

本製品は下記の条件（温度、湿度、気圧）を満たす清潔な場所で保管すること。

##### 保管条件

温度：-10～45℃

湿度：30～95%RH（ただし、結露状態を除く）

気圧：70～106kPa（大気圧範囲）

#### ＜有効期間・使用の期限（耐用期間）＞

有効期間（耐用年数）は適切な保守点検を行った場合、使用開始から1年間とする。

「自己認証（当社データ）による」

本製品は、消耗品である。

適用炭酸ガス送気装置の取扱説明書の手順に従って、使用前点検を実施し、必要がある場合は新品と交換すること。

### 【包装】

1個／パック

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 製造販売業者

富士フイルム株式会社

神奈川県足柄上郡開成町宮台 798 番地

TEL：0120-771669

#### 製造業者

富士フイルムテクノプロダクツ株式会社

#### 販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

東京都港区西麻布二丁目 26 番 30 号

TEL：03-6419-8033

